



Accu-Chek SmartGuide 全智航應用程式

用作連續葡萄糖監測感測器與行動裝置的
配對及實時數據傳輸，監測您的葡萄糖。



1

Accu-Chek SmartGuide 全智航應用程式下載及建立新帳戶指南




1 從 App Store 下載 Accu Chek SmartGuide 應用程式後，點擊「繼續」來登入/建立您的新帳戶。

2 輸入你的電子郵件地址，點擊「下一步」。

3 輸入驗證碼 (*驗證碼會透過電子郵件分享給您。查閱後，返回應用程式以完成帳戶設定)

4 系統將顯示一個畫面，提示您填寫個人資料。完成該步驟後，點擊「下一步」。

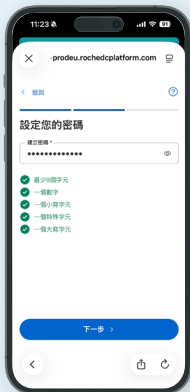

5 然後您需要設定密碼。完成後點擊「下一步」。

6 下一個畫面將提供條款與條件，以及用於市場營銷和產品改進的可選同意書。請仔細閱讀並接受與您相關的條款。

7 恭喜您！您的 Accu-Chek 帳戶設定現已完成。點擊「下一步」。

8 您現在可以使用您的電子郵件地址和密碼登入您的 Accu-Chek 帳戶。



9 根據指示定立相關連續葡萄糖監測設定，然後點擊「下一步」。

10 請仔細閱讀相關的重要資訊，點擊「我瞭解」。

11 最後，點擊「允許」以確保收到及時重要提示



Accu-Chek SmartGuide Predict 全智航「預測」應用程式

透過結合內置的AI智能預測演算法與實時數據，為您提供未來30分鐘、2小時以及夜間的葡萄糖走向，讓您能夠隨時掌握潛在變化。



2

下載Accu-Chek SmartGuide Predict 全智航預測應用程式並連結帳戶。
*首次使用需要進行一次性驗證及連結帳戶步驟。



1

從 App Store 下載 Accu Chek SmartGuide Predict 應用程式後，點擊「繼續」來登入您設立好的新帳戶。

2

點擊「繼續」去進行電子郵件地址驗證

3

輸入你的電子郵件地址，點擊「下一步」。

4

輸入驗證碼 (*新一個專屬 Predict 預測應用程式的驗證碼會透過電郵再次發送給您)。



5

全智航預測應用程式驗證完成！您現在可以使用您的電子郵件地址和密碼登入您的 Accu-Chek 帳戶。


6

點擊「下一步」進入主頁面

7

點擊「允許」以確保收到及時重要通知。

在“是否信任此裝置”選項中選取「是」以省略之後在同一電話裝置上再次驗證的需要。完成後，再次點擊「下一步」。

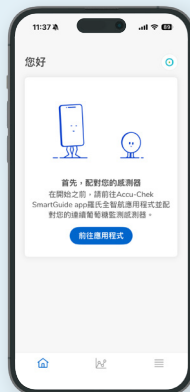

8

最後，按照指示報配對您的感測器便完成設定。

預測應用程式使用來自 Accu-Chek SmartGuide 全智航連續葡萄糖監測應用程式的資料估計您即將出現的葡萄糖值。

請務必先設定 SmartGuide 全智航應用程式，再配合使用預測應用程式。

這些應用程式能合作提供流暢的體驗。

使用首頁畫面右上方圖示按鍵即可輕鬆切換。