


# Clixmotion「激之動力」 獨家專利 減少採血痛楚


Accu-Chek Fastclix 易極採血筆採用獨家專利 Clixmotion「激之動力」技術，軸承導向設計控制採血針垂直扎入及收回，防止採血針擺動，力度輕柔，盡量避免刺激皮膚及神經組織，將痛楚感覺減至最低。

## Accu-Chek 採血筆 - Clixmotion 原理

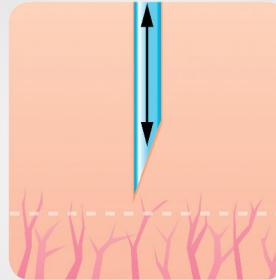

- 採血針垂直、扎入及收回，避免震動
- 力度輕柔，減少刺激神經組織，令採血彷如無痛

## 一般採血筆 - 彈弓原理

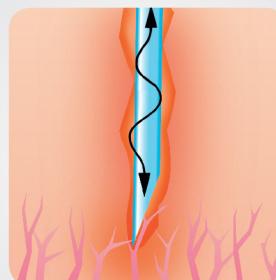

- 採血針擺動刺激神經組織，引致痛楚
- 採血針突然停頓產生強大的反彈力，增加痛楚感覺

# Accu-Chek FastClix 易極採血筆

- 1-click 採血，簡單易用
- 獨家專利Clixmotion，採血彷如無痛
- 11個採血深淺度，按個人需要調校合適度數
- 獨有針筒設計，觸不到、看不見採血針，安全衛生



## 採血唔覺痛！



DC-FAC-02-0814

非凡體驗 誰說不可能

客戶服務熱線：2485 7512 / 2485 7508

羅氏診斷(香港)有限公司  
香港新界葵涌興芳路223號  
新都會廣場一座17樓（港鐵站E出口）



ACCU-CHEK®

# 獨家專利Clixmotion 輕柔、採血唔覺痛！



Accu-Chek FastClix 易極採血筆  
1-Click OK  
採血唔怕易

ACCU-CHEK®


## 全球首創 一按採血

Accu-Chek FastClix 易極採血筆首創「一按採血」，配合獨特設計的Accu-Chek FastClix 針筒，簡單易用。加上獨家專利Clixmotion「激之動力」技術，令採血彷如無痛，血糖檢測更方便。



### 使用方法

#### 調校採血深淺度

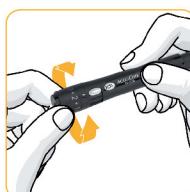

轉動筆蓋數字盤，可調校11個深淺度

#### 安裝針筒



拉開筆蓋



放入1個新針筒  
(針筒白色部份向內)



套上筆蓋

#### 採血



將採血筆緊貼指尖，  
按一下筆尾採血

#### 轉換採血針



來回撥一下白色轉針掣

### 採血針不應重覆使用

採血針使用過後，有機會因細菌滋生而引致傷口感染。而且，用過的針頭會因磨損而變得不再銳利，增加採血痛楚。所以，每次採血前要轉換一支新的採血針，確保安全衛生。



為避免重覆使用採血針，  
使用過的針筒不能再放入採血筆，請用完6支針才更換針筒。

## 簡單方便 採血更輕鬆

### 觸不到、看不見採血針

獨特設計的針筒內備有6支採血針，只需撥一下採血筆的轉針掣便可轉換1支採血針，用完6支針後才更換1個針筒。使用時不會看見或觸到採血針，可避免不慎被意外刺傷，既安全又方便。



### 一按採血 操作簡單

Accu-Chek FastClix 易極採血筆「一按採血」的設計，配合特有的Accu-Chek FastClix 針筒，無需每次安裝及丟棄採血針，大大減省不必要的麻煩，令採血過程更加輕鬆簡單。

### 特幼的採血針

Accu-Chek FastClix 採血針使用精密的切割技術，3面錐形逐漸收窄的最佳切割角度形成特幼的針咀，光滑的切割面減少與皮膚組織之間的摩擦，有助減少採血痛楚。

