



## 獨家專利 Clixmotion「激之動力」 輕柔、快速採血 減少痛楚

Accu-Chek Softclix 採血筆採用 Clixmotion「激之動力」技術，軸承導向設計防止採血針擺動，使採血針垂直、穩定並輕柔地落入血管，過程快而準，避免刺激周圍皮膚及神經組織，大大減少痛楚感覺。

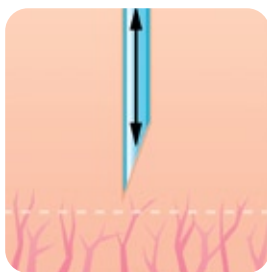

### Clixmotion 「激之動力」技術

- 採血針垂直落入及收回，避免左右擺動
- 針咀輕柔地落入血管，減輕受痛之壓力

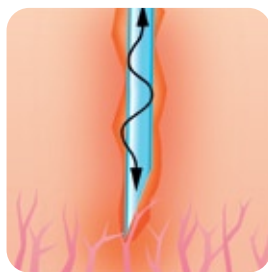

### 傳統式設計

- 採血針擺動刺激周圍皮膚及神經組織
- 採血針突然停頓產生強大反彈力，增加痛楚感覺



### Accu-Chek Softclix 採血針

- 使用精密切割技術，3切面的特幼針頭
- 光滑的切割面減少與皮膚組織之間的摩擦



**採血針不應重覆使用：**採血針使用過後，有機會因細菌滋生而引致傷口感染。而且，用過的針頭會因磨損而變得不再銳利，增加採血痛楚。所以，採血針應該用完即棄，每次採血要換一支新的採血針，確保安全衛生。

ACCUCHEK® Softclix

Roche

## 採血唔怕痛 血糖監測更輕鬆



ACCUCHEK®

## 原裝配備 羅氏品質保證

Accu-Chek Softclix 採血筆配合 Accu-Chek Softclix 採血針的卓越設計為糖尿病人減輕採血的痛楚，過去10多年來一直深受用家信賴。



### 使用方法

#### 準備採血筆



拉開筆蓋，放入採血針



擰開採血針的保護蓋，然後蓋上筆蓋



轉動筆蓋調校採血深淺度

#### 採血



按下筆尾按鈕掣(啟動掣變為黃色)



採血筆緊貼手指，按下黃色啟動掣採血

#### 棄針



拉開筆蓋，拉一下棄針掣，採血針自動彈出

## Accu-Chek Softclix 採血筆 減少採血痛楚

- 輕柔、快速採血
- 可調校11個採血深淺度
- 針頭特幼

Accu-Chek Softclix 採血筆及採血針的設計有助減少刺激皮膚及神經組織，減少採血痛楚。

### 非凡體驗 誰說不可能

客戶服務熱線：2485 7512 / 2485 7508

[www.accu-check.com.hk](http://www.accu-check.com.hk)

羅氏診斷(香港)有限公司  
香港新界葵涌興芳路223號  
新都會廣場一座17樓



ACCU-CHEK®