

如何移轉至 mySugr app

快速入門指南

Accu-Chek SmartGuide 和 Predict 應用程式¹ 即將轉移至 mySugr app，請務必轉換應用程式。過渡期結束後，新的 Accu-Chek SmartGuide 連續葡萄糖監測感測器將僅能與 mySugr app 配對。

立即下載
mySugr app!



只需幾下按鍵即可轉換應用程式



步驟 1
下載 mySugr app



步驟 2
以現有 Accu-Chek 帳戶登入




步驟 3
遵循引導完成設定

1




在 Accu-Chek SmartGuide 羅氏全智航應用程式中會收到通知，請您轉換應用程式

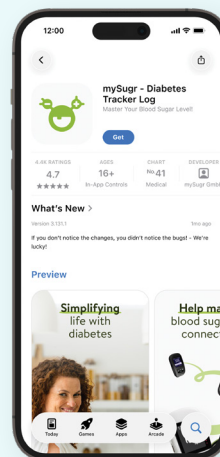

在 App Store 或 Google Play 下載或更新 mySugr app

2

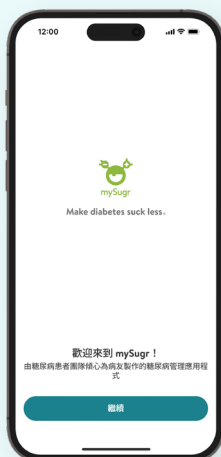

開啟 mySugr app，
然後選擇「繼續」



將引導您至 羅氏
平台進行登入



輸入與您的
Accu-Chek 帳戶連結
的電郵地址



接下來，使用您目
前的 Accu-Chek 密
碼登入

1. Accu-Chek SmartGuide 羅氏全智航應用程式和 Accu-Chek SmartGuide Predict 羅氏全智航預測應用程式。

3



登入後，請遵循快速引導步驟



請設定您的糖尿病類型、胰島素療法、藥物使用情形、測量單位和葡萄糖範圍



選擇您的裝置時，請選擇「Accu-Chek SmartGuide」



最後，請務必允許通知



一切就緒！

引導完成後，您即可在 mySugr app 中與下一個連續葡萄糖監測感測器進行配對。

建議您下次更換感測器時轉換到 mySugr app。

需要幫助？

您可以透過以下方式聯絡我們的客戶服務團隊：

- 電話：2485 7522
- 電子郵件：hongkong.accu-chek@roche.com



進一步瞭解

瀏覽Accu-Chek網站，進一步瞭解轉換程序

Roche

ACCUCHEK、ACCUCHEK SMARTGUIDE 和 MYSUGR 是 Roche (羅氏) 的商標。所有其他產品名稱、商標和品牌形象是其各自所有者的財產。
Inquiry hotline 查詢熱線：+852 2485 7522 | <https://www.accu-chek.com.hk/> | © 2026 Roche Diagnostics (HK) 羅氏診斷 (香港) 有限公司
Roche Diagnostics (Hong Kong) Ltd | Level 17, Metroplaza, Tower 1 | 223 Hing Fong Road, Kwai Chung | New Territories | Hong Kong
DS-2026-JUL-025

[accu-chek.com.hk](https://www.accu-chek.com.hk)